


Actreen® Hi-Lite teknologi

Innovasjon og ytelse

1. En unik teknologi basert på hydrofil gel

Innhold: Vann- og glyserinbasert formel, hvor geleffekten opprettholdes under hele kateteriseringen.

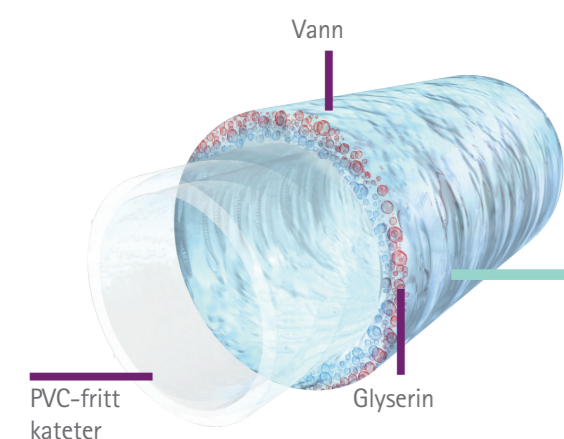

Fordeler for pasienten

- **Ingen bruk av vann:** gelegenskaper
- **Produkt klart til bruk:** Ikke behov for å tilsette ekstra vann
- **Ingen risiko for å tørke ut før innføring³:** kateteret holdes fullstendig lubrikert under hele innføringen

2. Kateteregenskaper og innovativ innpakning

Jevn Drenasjeåpninger¹

Sikkerhet

Kateteret kommer ikke i direkte kontakt med hender og fingre
Minimerer risiko for kateterkontaminering

Berøringfritt

Et enkelt konnektordesign
Sørger for et godt gripetak uten å berøre kateteret⁴

Actreen® Hi-Lite produktserie

Produktspesifikasjoner



Actreen® Hi-Lite Cath

	CH	ø (mm)	Antall/eske	Art. nr.
TIEMANN - 41 cm				
	08	2,7	30 + 1 diskret etui	238108FI
	10	3,3	30 + 1 diskret etui	238110FI
	12	4,0	30 + 1 diskret etui	238112FI
	14	4,7	30 + 1 diskret etui	238114FI
	16	5,3	30 + 1 diskret etui	238116FI
	18	6,0	30	238118F

NELATON - 41 cm

	08	2,7	30 + 1 diskret etui	238208FI
	10	3,3	30 + 1 diskret etui	238210FI
	12	4,0	30 + 1 diskret etui	238212FI
	14	4,7	30 + 1 diskret etui	238214FI
	16	5,3	30 + 1 diskret etui	238216FI
	18	6,0	30	238218FI

NELATON - 20 cm

	06	2,0	30 + 1 diskret etui	238306FI
	08	2,7	30 + 1 diskret etui	238308FI
	10	3,3	30 + 1 diskret etui	238310FI
	12	4,0	30 + 1 diskret etui	238312FI
	14	4,7	30 + 1 diskret etui	238314FI
	16	5,3	30 + 1 diskret etui	238316FI

Actreen® Hi-Lite Set

	CH	ø (mm)	Antall/eske	Art. nr.
TIEMANN - 37 cm				
	10	3,3	30 + 1 diskret etui	242110FI
	12	4,0	30 + 1 diskret etui	242112FI
	14	4,7	30 + 1 diskret etui	242114FI
	16	5,3	30 + 1 diskret etui	242116FI
	18	6,0	30	242118FI

NELATON - 37 cm

	10	3,3	30 + 1 diskret etui	242210FI
	12	4,0	30 + 1 diskret etui	242212FI
	14	4,7	30 + 1 diskret etui	242214FI
	16	5,3	30 + 1 diskret etui	242216FI
	18	6,0	30	242218FI

¹ Report n° 7.5.AA.100.1

² Report n°7.5.AB.054.1

³ Report N°7.5AC059.2

For å trygge sikkerhet og hygiene, anbefales det å bruke produktet så raskt som mulig etter åpning.

Dette medisinske utstyret er CE-sertifisert i henhold til forskrift om medisinsk utstyr.

Produkter som selges av B. Braun Medical AS skal brukes kun i henhold til pakningsvedlegg, som er oppdatert og vedlagt i eskene.

Bilder og illustrasjoner kan avvike fra faktisk produkt.

⁴ «Results reports of the usability test product on Actreen® Hi-Lite Cath»

⁵ «Results report of the USABILITY TEST Product: Actreen® Hi Lite Set»

B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: kundeservice.no@bbraun.com



ACTREEN® HI-LITE PRODUKTSERIE

DISKRET OG ENKEL DESIGN

Nøkkeltall

20 års erfaring

60 min uten å tørke ut³

1,3 TIL 2 GANGER mindre avfall pr. år* ved bruk av Actreen® Hi Lite Produkter



- Multifunksjonell komponent
- Letteste produktet på markedet*
- Enkel design

SVÆRT MILJØVENNLIG BRUK

*sammenlignet med 3 hovedprodukter i markedet

Actreen® Hi-Lite produktserie

Den usynlige løsningen – alltid klar til bruk

Fordeler

- Biokompatibelt katetermateriale, PVC-fritt, DEHP-fritt
- Atraumatiske sideåpninger sørger for jevn blæredrenasje¹
- Prelubriert med hydrofil gel: kateter klart til bruk, ikke behov for å tilsette vann
- Åpningsalternativer tilpasset både pasienter med god fingerstyrke og redusert fingerstyrke
- Sikker håndtering med 2 berøringsfrie alternativer for innføring av kateteret


Merverdi



Kan foldes og legges i det medfølgende etuiet for diskret oppbevaring*



2 valgmuligheter, tilpasset fingerstyrken, for åpning av folien

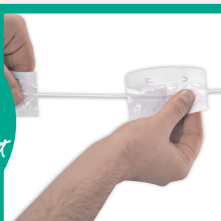

2 valgmuligheter for å unngå berøring av kateteret under bruk

Hjemme



Cath

- Nytt utseende**
- Hvit pakningsfolie gir mer diskresjon



- Utformet for sikker bruk**
- Produktet kan brukes aseptisk ved bruk av sterile hansker når kateteret tas ut av pakningsfolien.



På farten



Set

- Konsept med alt i ett**
- Kateter + pose forseglet sammen og foldet til en kompakt størrelse*



- Tilbakeslagsventil**
- Integrert i posen for å unngå lekkasje ved oppbevaring²



- Gradert pose på 1000 ml**
- Måling av urin (anslagsvist volum)
 - Lett synlig gradering
 - Praktisk utformet pose, som kan tømmes ved hjelp av avrinningsfeltet i det ene hjørnet⁵

Actreen® Hi-Lite Set



*Ch18 størrelsen kan ikke foldes