


Noen enkle trinn for bruk av Diveen®*

1. Før bruk av Diveen®

- Vask hendene grundig.
- Finn en komfortabel stilling.

2. Klargjøring av Diveen®

- Klem den fleksible ringen forsiktig sammen og før den inn i innføringshylsen.
- Sett skyveren tilbake i innføringshylsen for å gjøre klart for innføring.

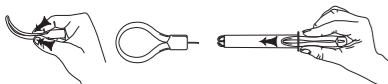

3. Innføring av Diveen®

- Før tuppen av innføringshylsen ca. 2 cm inn i skjeden
- Skyv ringen videre inn ved hjelp av skyveren (samme metode som ved bruk av tampong m/innføringshylse).




4. Fjerning av Diveen®

- Trekk forsiktig i uttrekkstråden for å fjerne ringen fra skjeden.



* Les bruksanvisningen nøye før bruk. Rådfør med lege for best mulig hjelp i forbindelse med din inkontinens.

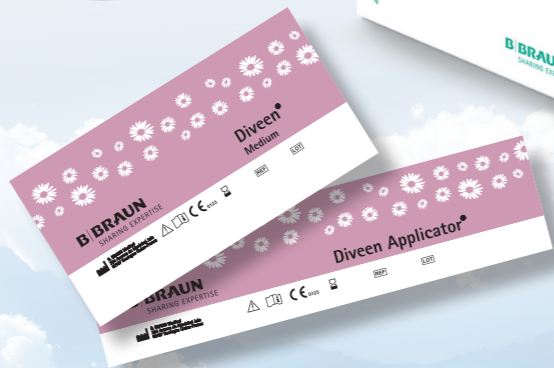

Artikkelnummer	Helfo. nr.	Størrelse	Antall stk./eske
3132NO	827599	Small	5 stk. + 1 innføringshylse
3133NO	850445	Medium	5 stk. + 1 innføringshylse
3022NO	975108	Small	15 stk. + 1 innføringshylse
3023NO	850998	Medium	15 stk. + 1 innføringshylse

B. BRAUN Medical
204 Avenue du Marechal Juin
92100 Boulogne-Billancourt - France

CE 0123

For mer informasjon, les på vår hjemmeside:
www.bbraun.no eller scan qr-koden:



B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: kundeservice.no@bbraun.com

Januar 2019



Nyhet

Kjenn på
frihetsfølelsen!

DIVEEN®
Intravaginal tampong, som
reduserer stressinkontinens.⁽¹⁾

Gjør hverdagen lettere ...

Millioner av kvinner over hele verden lider av stressinkontinens. I et land som Frankrike, påvirker dette flere enn 3 millioner kvinner. Har du vært redd for å le, gå i selskap eller delta i sportsaktiviteter? Urinlekkasje kan påvirke deg i dagliglivet og hindre deg i å gjøre de tingene du helst vil gjøre.⁽²⁾

Ikke la det bestemme livet ditt, velg Diveen®, den diskret beskyttelsen!



Hva er Diveen® ?

Diveen® er et intravaginalt hjelpemiddel for kvinner med urinlekkasje, spesielt stressinkontinens.

Like enkel å bruke som en tampong!

Klinisk bevist **effekt** i håndtering av stressinkontinens hos kvinner.⁽³⁾

- ☀ Diveen® reduserer hyppighet av urinlekkasje med gjennomsnittlig 69 %⁽³⁾
- ☀ Diveen® forbedrer pasienttilfredsheten betydelig: Tilfredshetscore på 78/100 for pasienter, som brukte Diveen®*
- ☀ Diveen® øker velværefølelsen. ⁽³⁾

*vs. tilfredshetscore på 5/100 for pasienter, som ikke brukte Diveen ⁽³⁾

Hvorfor Diveen®?

Diskret, effektiv og enkel å bruke ⁽³⁾, Diveen® følger deg overalt



Innovativt og patentert konsept ⁽¹⁾



Diveen® er utformet for å støtte skjedevæggen i området under blærehalsen. Ved anstrengelser, vil vekten fra blæren legge trykk på den fleksible ringen på Diveen® slik at den faste delen vil bevege seg og lukke urinrøret og betydelig redusere risikoen for urinlekkasje.⁽³⁾

Hvorfor bruke Diveen® ?

- En unik funksjon, som gjør det mulig å redusere betydelig risikoen for urinlekkasje.⁽¹⁾
- 100 % diskret beskyttelse.
- Biokompatibelt materiale.⁽¹⁾
- 12 timer med inkontinenskontroll, som gjør det mulig å delta i fysiske aktiviteter.
- Like enkel å bruke som en tampong. Det er ikke nødvendig å ta ut Diveen® i løpet av dagen, selv ikke ved toalettbesøk.
- Kan settes inn uten innføringshylse.



www.diveen-bbraun.fr

(1) Brevet EP 1 924 218 B1

(2) Haab F. et al. Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par colposuspension percutanée: une technique non satisfaisante. Progrès en Urologie 2001, 11:336-339

(3) Cornu J.N et al. 75NC007 device for noninvasive stress urinary incontinence management in women: a randomized control trial. International Urogynecology Journal 2012, 23 (12): 1727-34