


Intrafix® SafeSet

Gir hver avdeling ekstra grad av sikkerhet og høy effektivitet

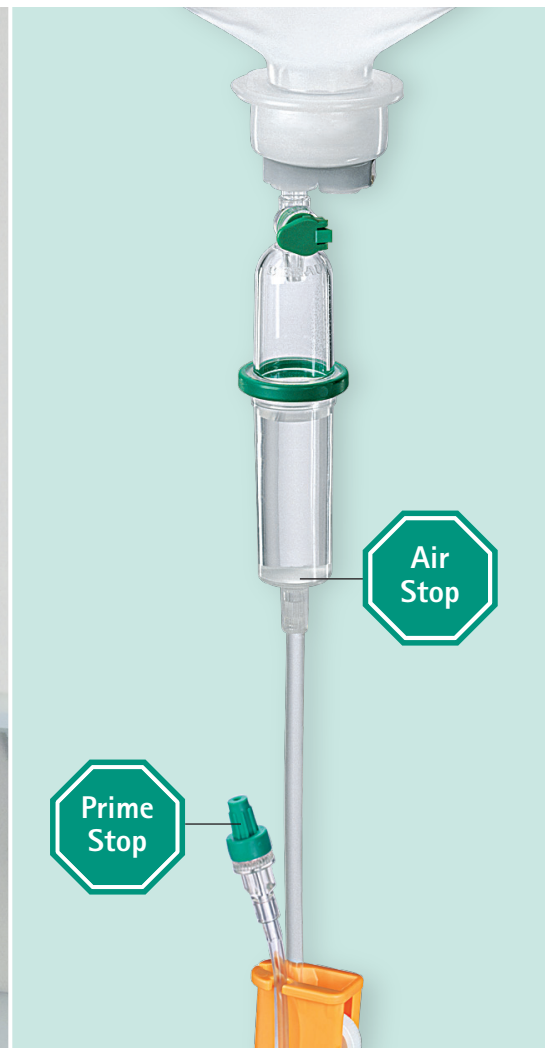

Infusjonsterapi

Møt dagens utfordringer ...

Air Stop

Air Stop

Prime Stop

Prime Stop

Rulleklemme

Ny design og funksjon

DEHP - fri

**PVC slange*
DEHP-fri**

Air Stop

Den innovative AirStopfunksjonen hindrer infusjon av luft, og lar ikke luft gå ned i infusjonsslangen. Når infusjonsbeholderen går tom, opprettholder AirStop et konstant væsknivå. Luft går ikke igjennom til pasienten.

Membranfilter – filteret med to fordeler

En unik, lufttett filtermembran fungerer som en barriere, beskytter mot luftinfusjon og filtrerer samtidig partikler på 15 µm og mindre. Takket være AirStop, krever bytte over til neste beholder mindre arbeid, som åpning av systemet, risikofri re-spiking, mer ro på avdelingen.

Prime Stop

Beskyttelseshette

En beskyttende hette med integrert hydrofobisk membran stopper væskelekkasje og beskytter mot kontaminering.

PrimeStop automatiserer fylling og forhindrer væskelekkasje

- PrimeStop sikrer at infusjonssettet fylles automatisk.
- Infusjonsvæske vil ikke dryppe ned på hender, gulv eller sengetøy.
- Flere infusjoner kan klargjøres på én gang, raskere og mer hygienisk enn tidligere.
- PrimeStop opprettholder et lukket system inntil det er koblet til pasienten.
- Effektiv forebygging av kontaminering.

* PVC-fri slange er også tilgjengelig

... på den sikreste og mest effektive måten

Flere attraktive egenskaper



God kontroll på væskestrømmen

Rulleklemme, ny form og funksjon: komfortabel å holde og bruke, høyere nøyaktighet ved innstilling av dråpehastighet, enklere å rulle hjulet. Umiddelbar hastighetsjustering. Den store rulleklemmen gir sikrere grep.




Forankring av spiss for sikker destruering

Praktisk spor for sikker beskyttelse av spiss etter bruk.



Praktisk oppheng av slange/pasientkobling


Pasientkoblingen og slangen kan festes i sporet på siden av rulleklemmen under og etter fylling i påvente av tilkobling/bruk.

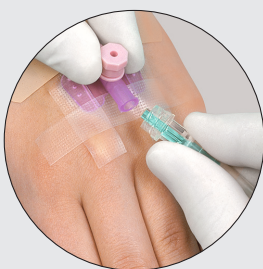

Luer-Lock for sikker sammenkobling

Sett inn slangekoblingen og skru til. Hindrer utilsiktet frakobling.

Alle designegenskaper i henhold til ISO 8534-4/8

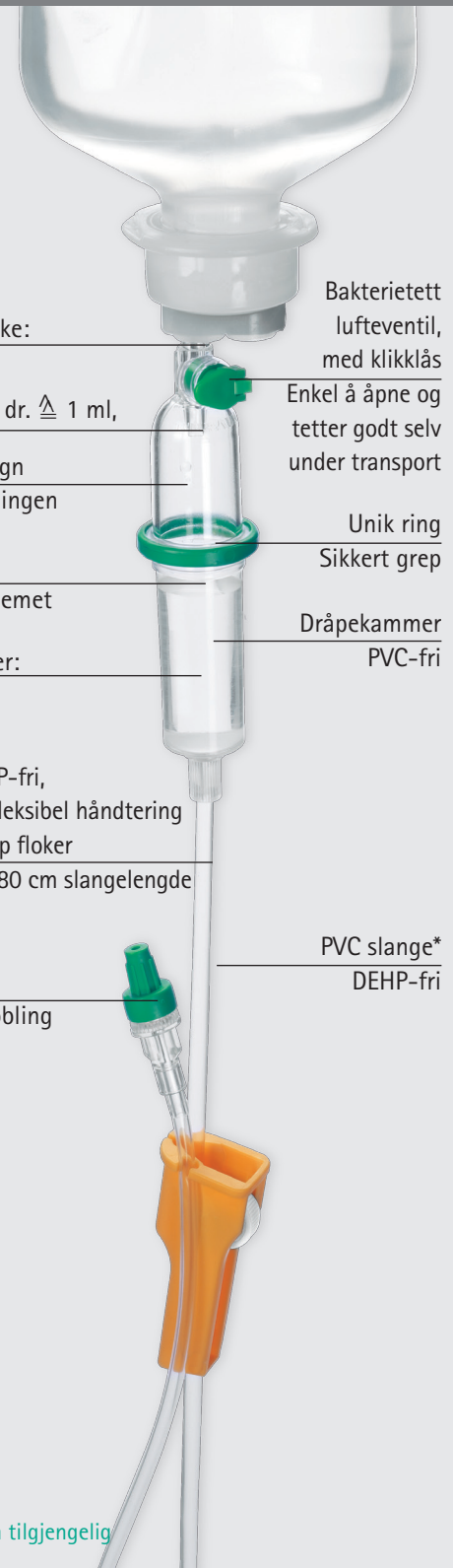

- Universal, klar ISO spike:
Enkel å penetrere
- Lang dråpeformer, 20 dr. Δ 1 ml,
- Transparent buet design
Enkelt å se dråpeformingen
- Ideelt fyllingsnivå
for å hindre luft i systemet
- Elastisk pumpekammer:
Enkel og rask fylling
- Klar PVC-slange*, DEHP-fri,
god klarhet, enkel og fleksibel håndtering
og fylling, løser lett opp floker
Standard 150 cm og 180 cm slangelengde
- Luer-lock fiksering
med PrimeStop-hette
For sikker pasienttilkobling
- Bakterietett
lufteventil,
med klikklås
- Enkel å åpne og
tetter godt selv
under transport
- Unik ring
Sikkert grep
- Dråpekammer
PVC-fri
- PVC slange*
DEHP-fri

* PVC-fri slange er også tilgjengelig

Intrafix® SafeSet – velg ditt alternativ

Intrafix® SafeSet produktsortiment

	Spesifikasjon	Lengde på slangen (ca. cm)	Fyllvolum (ml)	Artikkel nr
Intrafix® SafeSet DEHP-/ Latex-fri	Basic	180	11,34	406 3000
	Basic	230	14,49	406 3003
	Infuvalve® B.C.V. (med tilbakeslagsventil)	180	11,34	406 3001
	N.T.P. (Neutrapur® slange, PVC-fri)	180	11,34	406 3002*
	Eurofix® I.S. (med injeksjonsstuss med gripeplate)	180	11,34	406 3005
	Y-N.F. (med nålfri injeksjonsventil)	210	13,23	406 3004
	3-W.S.C. (med 3-veiskran)	220	13,86	406 3006

Fyllvolum: 6,3 ml/1m
2 bar trykk (maks)

Pakningsstørrelse: 100 stk.
* Kun til gravitasjonsinfusjon.



En komparativ studie¹⁾ versus konvensjonelle infusjonssett har vist at Intrafix® SafeSet reduserer tiden det tar å forberede en infusjon. Inkluderer relaterte kostnader.

1) Frei A., Profitability analysis of Intrafix® SafeSet when used in peripheral venous gravity infusions (2003, submitted for publication).

2) Neue Produkte zur Qualitätssicherung im Pflegebereich – „Die Schwester/Der Pfleger“, Vol. 45, Jahrgang 10/06.

3) Evaluación de un nuevo equipo de infusión. Revista de enfermería ROL, Vol. 31 Nº 9, Septiembre 2008

Intrafix® SafeSet: Brukerfordeler

- Bidrar til å forhindre luft i infusjonen og infusjonsrelaterte infeksjoner
- Betydelig redusert arbeidsbelastning
- Tids- og kostnadsbesparende
- Sikker fylling – lukket system
- Infusjonsslanger med DEHT, den nye generasjonen mykgjørere, som ikke inneholder ftalater. Pasientsikkerhet først
- Ny rulleklemme – mer finjustert, mer fleksibel kontroll av dråpehastighet. Enklere å justere hastighet
- Kan brukes i infusjonspumper som ikke krever dedikerte sett
- Tåler opp til 2 bar trykk