



BRUKSANVISNING URINCOL®

STERIL, SELVKLEBENDE URINOPPSAMLINGSPOSE

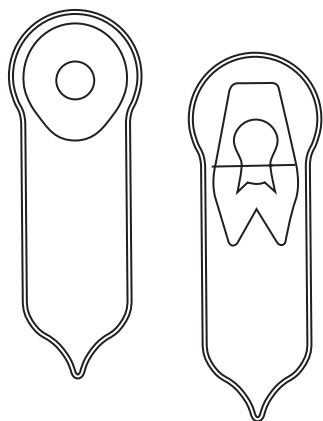

- Plasser posen rundt barnets penis eller urinrørsåpning med et lett trykk for å sikre at alle kanter er godt festet (Fig. 1).
- For tømbare urinposer: Kontroller at tappeventilen er stengt før du fester posen til huden. Tappeventilen er spesielt utformet for: - direkte prøvetaking med sprøyte (a) - tilpasning til universal kateterkopling (b)
- Ved fjerning: løft forsiktig i et hjørne og dra posen av.
- For å beskytte prøven, forsegl kantene umiddelbart og, om nødvendig, sett på ekstra tape.
- I forbindelse med biokjemiske, cytologiske og bakteriologiske undersøkelser, skal posen ikke brukes i mer enn 30 minutter. Selv om posen er tom, skal den byttes ut innenfor dette tidsrommet. Send urinen til analyse innen 2 timer etter prøvetaking. Dersom dette ikke er mulig, kan prøven oppbevares i kjøleskap i maks. 12 timer. Noter tid for prøvetaking på posen.
- I forbindelse med diuresemåling, skal posen skiftes ved behov; hvis den ikke kleber lenger, urenheter i pose.



Fig.1

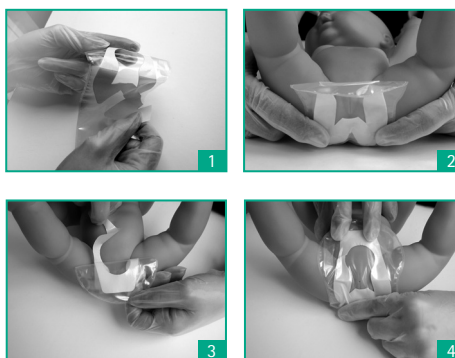

Til bruk i pediatri i forbindelse med diuresemåling eller ved biokjemiske, cytologiske og bakteriologiske undersøkelser.

OBS: Påse at posens størrelse er tilpasset barnets vekt.

- Vask hendene grundig /gjennomfør hånddesinfeksjon
- Legg barnet på rygg
- Rengjør forsiktig huden med vann og nøytral såpe. Ikke benytt antiseptiske middel dersom dette ikke er forordnet av lege. Huden skal være ren, tørr og ikke smøres eller pudres. Påse at huden ikke er irritert.
- Ta av det utstansede feltet på klebeflaten.
- Ta forsiktig bort beskyttelsespapiret fra klebeflaten.

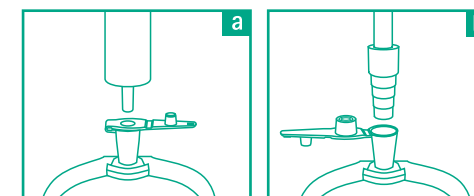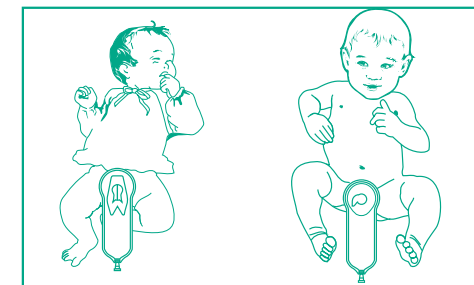

Paediatric Closed	Weight	Ref	Content
	>2500g	227550*	100 Pcs.
	>2500g	227549*	20x1 Pcs.
	>2500g	227560*	100 Pcs.
	>2500g	227559*	20x1 Pcs.
Paediatric Drainable	Weight	Ref	Content
	>2500g	227546*	50 Pcs.
	>2500g	227547* ¹	50x1 Pcs.
	>2500g	227566*	50 Pcs.
	>2500g	227567* ¹	50x1 Pcs.
Premature	Weight	Ref	Content
	Standard 1200-2500g	227571*	50 Pcs.
	Mini <1200g	227570*	50 Pcs.
	Standard 1200-2500g	227573*	50 Pcs.
	Mini <1200g	227572*	50 Pcs.

* For each country, a specific letter is added at the end of the reference
¹ In France only