


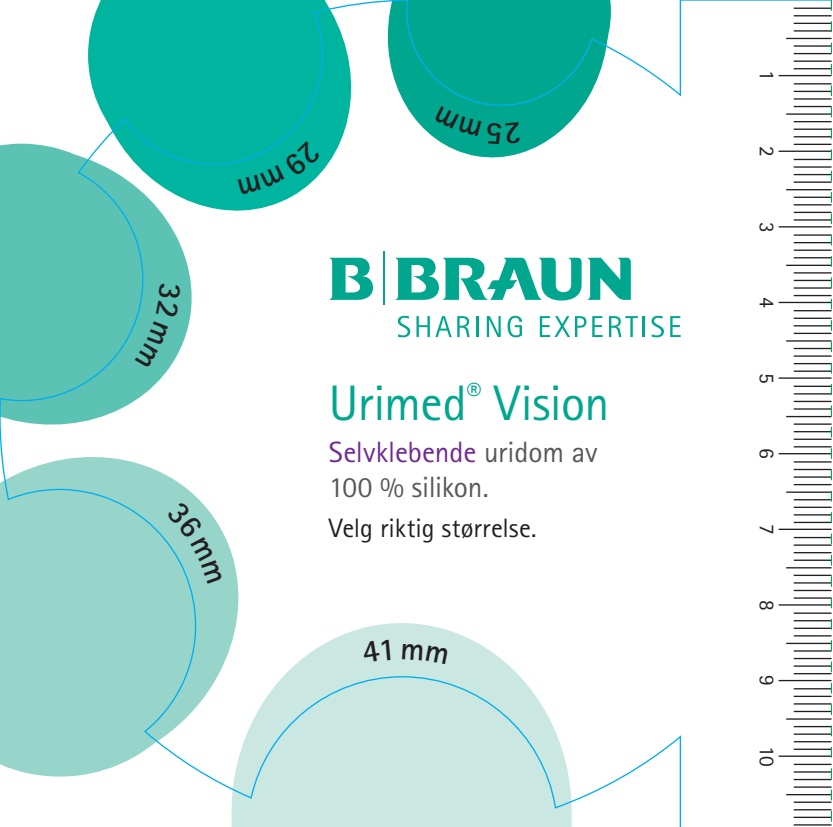


Urimed® Vision

Selvklebende uridom av 100 % silikon.

Velg riktig størrelse.



Urimed® Vision Bestillingsinformasjon:

Urimed® Vision Standard	Ø (mm)	Art. nr.	Helfonr.
 <p>1 eske inneholder 30 uridomer. Klebeflate: 4,5 cm</p>	25	IH2525N	951338
	29	IH2529N	907498
	32	IH2532N	855369
	36	IH2536N	981858
	41	IH2541N	977155
Urimed® Vision Short	Ø (mm)	Art. nr.	Helfonr.
 <p>1 eske inneholder 30 uridomer. Klebeflate: 4,5 cm</p>	25	IH4525N	831781
	29	IH4529N	825128
	32	IH4532N	966120
	36	IH4536N	982122
	41	IH4541N	918752
Urimed® Vision Ultra	Ø (mm)	Art. nr.	Helfonr.
 <p>1 eske inneholder 30 uridomer. Klebeflate: 7,5 cm</p>	25	IH3525A	
	29	IH3529A	
	32	IH3532A	
	36	IH3536A	
	41	IH3541A	

Skann QR-koden for å finne våre godkjente produkter på blåreseptordningen:



B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: kundeservice.no@bbraun.com

Urimed® Vision

Løsningen for menn med urininkontinens

Hva er et uridom og hvordan brukes det?

Uridomet er et utvendig kateter som tres over penis og deretter kobles til en urinpose hvor oppsamling av urinen skjer.

Uridomet har en klebeflate som fester det sikkert til huden.

Uridomet kan være på i opptil 24 timer.


Uridomet kan også benyttes under trening eller

annen aktivitet for å fange opp urinlekkasje.

Dersom du opplever hyppig vannlatingstrang på natten, kan Uridomet sammen med urinpose bidra til en bedre søvnkvalitet.

Uridom

Tilgjengelig i 5 forskjellige diametere (25, 29, 32, 36 og 41 mm) og 2 lengder for å sikre god tilpasning og at uridomet sitter godt på plass.

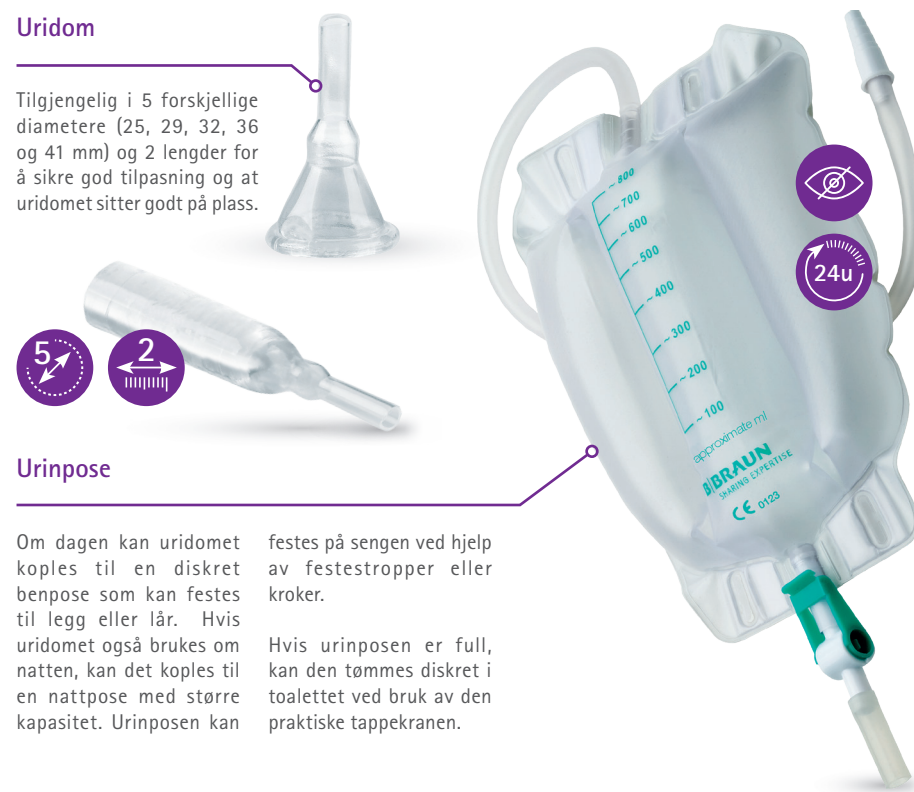

Urinpose

Om dagen kan uridomet koples til en diskret benpose som kan festes til legg eller lår. Hvis uridomet også brukes om natten, kan det koples til en nattpose med større kapasitet. Urinposen kan

festes på sengen ved hjelp av festestropper eller kroker.

Hvis urinposen er full, kan den tømmes diskret i toalettet ved bruk av den praktiske tappekranen.



Urimed® Vision

Løsningen for menn med urininkontinens

“ Har du urinlekkasje? Du er ikke alene. ”

Et viktig første steg er å kontakte legen din for å finne en løsning.

Hvis du har urinlekkasje, kan du alltid stole på **Urimed® Vision**, en diskret løsning som gir deg mulighet til å leve ditt daglige liv uten bekymring.

Takket være uridomet i 100 % silikon og den diskrete urinposen, gir **Urimed® Vision** trygghet og komfort hele dagen.



En garantert tilpasset løsning



Urimed® Vision Standard

Dette uridomet er ofte det som prøves først. Det har en lengde på 7,5 cm et innvendig klebelag på 4,5 cm og finnes i 5 størrelser.

Vær nøye med å finne rett størrelse/diameter, bruk måleverktøyet i denne brosjyren .



Urimed® Vision Short

Dette uridomet har en kortere lengde på 4,5 cm, men har klebeflate på hele lengden (4,5 cm). Dersom du beveger deg mye eller opplever problemer med å få festet et lengre uridom kan dette være løsningen for deg.

3
versjoner




Urimed® Vision Ultra

Dersom du trenger et uridom med standard lengde (7,5 cm) og behøver høyeste grad av sikkerhet kan denne varianten med klebefeste på hele lengden (7,5 cm) være løsningen du leter etter.


Hvordan ta på uridomet?




Vask penis med vann og mild såpe. Tørk forsiktig slik at uridomets klebeflate fester godt. Det er meget viktig.

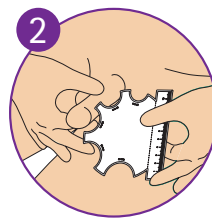


Bruk målene for å finne nøyaktig diameter på penis. Ta målet midt på penis /der den er tykkest.

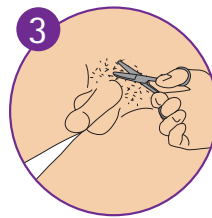


Fjern pubishår hvis det er nødvendig for at uridomet skal feste seg

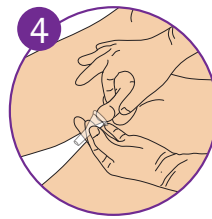

Hold uridomet i den øvre delen og rull ut nedover penis.

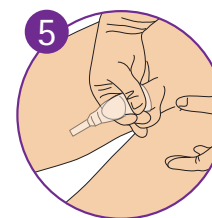

Klem forsiktig på uridomet for at uridomets klebeflate skal feste godt.

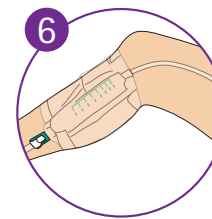

Kople til urinposen å få det til å sitte forsvarlig fast.

For å fjerne uridomet:

Løsne uridomet forsiktig. Rull uridomet forsiktig av penis. Bruk av en varm og fuktet hanske/klut kan gjøre det enklere.

	Ø (mm)	Art. nr.	Helfonr.
1 eske inneholder 30 uridomer.	25	IH2525N	951338
	29	IH2529N	907498
	32	IH2532N	855369
	36	IH2536N	981858
1 eske inneholder 30 uridomer.	41	IH2541N	977155
	25	IH4525N	831781
	29	IH4529N	825128
	32	IH4532N	966120
1 eske inneholder 30 uridomer.	36	IH4536N	982122
	41	IH4541N	918752
	25	IH3525A	
	29	IH3529A	
1 eske inneholder 30 uridomer.	32	IH3532A	
	36	IH3536A	
	41	IH3541A	