





Urinocol® Paediatric Premature

Urinocol® Paediatric bestillingsinformasjon:

		Artikkel- nummer	Stk/ eske
	Steril åpen paediatrisk pose	Gutt 227546M	50
		Jente 227566M	50
	Steril lukket paediatrisk pose	Gutt 227549M	20
		Jente 227559M	20

Urinocol® Premature bestillingsinformasjon:

		Vekt	Artikkel- nummer	Stk/ eske
	Steril prematurose	Standard 1200- 2500 g	227571M	50
		Mini 1200 g	227570M	50
	Steril prematurose (med forlengelses- slange*)	Standard 1200- 2500 g	227573M	50
		Mini 1200 g	227572M	50

*laget av PVC: DEHP fri



B. Braun Medical AS | Kjernåsveien 13 B | 3142 Vestskogen | Norge
Tlf. 33 35 18 00 | www.bbraun.no | E-post: kundeservice.no@bbraun.com



URINOCOL®
PAEDIATRISKE URINPOSER TIL GUTTER OG JENTER
Tilpassede løsninger


Urinocol® Premature




Til baby fra
1200 g to 2500 g
Poser til premature
babyer

- 2 størrelser: Mini og Standard
avhengig av babyens vekt.

"Fallsjermfasong",
som holder posen
bedre på plass.

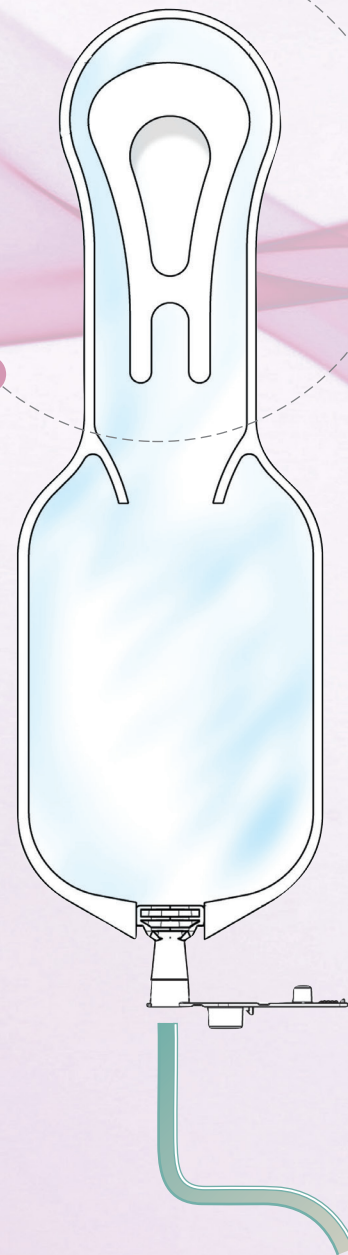

Med forlengingsslange:
kopling til urinpose
tilpasset inkubator.

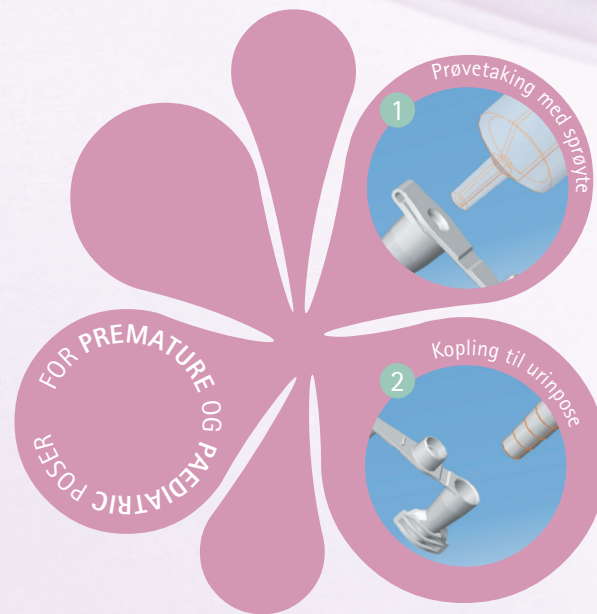

Tilpasset anatomien til
jenter og gutter.

Urinocol® Paediatric



Til baby > 2 500 g

- Klebmiddel med høy hudtoleranse: skånsom ved applikasjon og fjerning.
- Klebefelt formet etter anatomien til gutter og jenter.
- Transparent: permanent synlig kontroll av urin.
- Materiale: PVC-fri pose / lateksfritt klebemiddel.



UTEN TAPPEVENTIL
Lukket pose

- Urinprøvetaking ved biokjemiske, cytologiske eller bakteriologiske undersøkelser.



MED TAPPEVENTIL
Åpen pose

- Oppsamlingspose ved diuresekontroll

Urinocol® Paediatric

Applikasjon trinn for trinn:

- Velg den riktige størrelsen! Pass på at størrelsen på posen er tilpasset barnets vekt.
- Forberedelse av huden: tørr, uten oljer.
- Følg anvisningen.



Fjern og kast det midtre papiret på klebefeltet.
Fjerne den nedre delen av papiret



Trykk klebefeltet forsiktig på huden under babyens penis eller vulva.



Fjern den øvre delen av papiret.



Trykk klebefeltet forsiktig på huden rundt babyens penis eller vulva.